

LAITTEEN KÄYTTÖNOTTO JA LÄHETYS

SCIL VET abc

16.5.2018
versio 1.


Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka otat käyttöön Triolab Oy:n huollon ajaksi lähettämän lainalaitteen ja lähetät oman laitteesi huoltoon.

VALMISTELE OMA, HUOLTOON LÄHTEVÄ LAITTEESI LÄHETYSKUNTOON

- Tyhjennä mittakammiot laitteen ollessa vielä päällä valitsemalla ylös-alas-nuolinäppäimillä **4-SERVICE** ja painamalla **ENTER**:



- Valitse huolto-valikosta ylös-alas-nuolinäppäimillä **2-DRAIN CHAMBERS** ja paina **ENTER**:

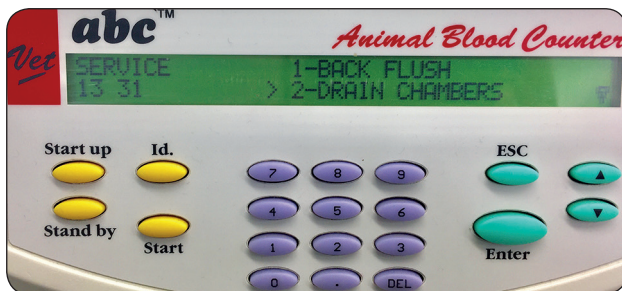


- Kammioiden tyhjentyminen kestää 20 sekuntia.
- Kun toimenpide on suoritettu, sammuta virta laitteen virtakatkaisimesta, joka sijaitsee laitteen takaosassa.
- Poista reagenssipakkaus.
- Irrota virtajohto laitteen liittimestä ja mahdollinen tietokonekaapeli sekä printteri-kaapeli laitteen takaa.
- Varmista, että laitteen etuovi on lukittu.

LAITTEEN LÄHETYS

- Pakkaa laite kuljetuslaatikkoon ilman virtajohtoa ja kiinnitä mukana tullut **palautusrahtikirja** laatikon päälle.
- Kun laitteesi on pakattu ja saapunut lainalaite todettu käyttökuntoiseksi, soita Triolabin asiakaspalvelunumeroon **0201 226 600** ja tilaa laitteen nouto. Ilmoita myös, mikäli aukioloaikanne rajoittavat laitteen noutoa.

HUOLLON AJAKSI SINULLE LÄHETETYN LAINALAITTEEN KÄYTTÖNOTTO


- Avaa lainalaitelaatikon lukitukset ja nosta kansi varovasti kohtisuoraan ylöspäin.
- Tarkista, ettei laitteessa ole näkyviä vaurioita.
- Mikäli laite on tuotu juuri kylmästä ulkoilmasta, anna laitteen olla huoneenlämmössä tunti ennen käynnistämistä.
- Nosta laite pöydälle ja kytke virtakaapeli sekä mahdollinen tietokonekaapeli sekä printteri-kaapeli laitteen taakse.
- Asenna laitteeseen reagenssipakkaus.
- Käynnistä laite virtakytkimestä. Laitteen näyttöön ilmestyy **Start Up** -valinta:

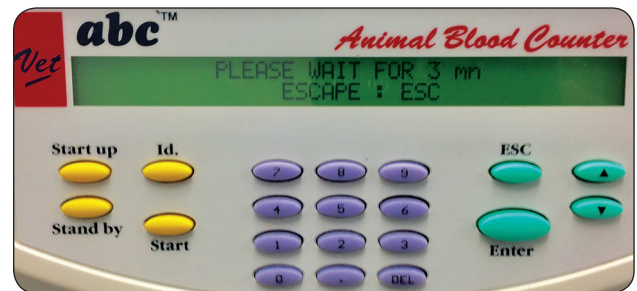


- Paina **ESC**-painiketta. Laitteen aloittaessa **Start Up** -ajon, keskeytä ajo painamalla **ESC**-painiketta toistamiseen.
- Valitse päävalikosta ylös-alas-nuolinäppäimillä **4-SERVICE** ja paina **ENTER**:



- Valitse huolto-valikosta ylös-alas-nuolinäppäimillä **3-REAGENT PACK** ja paina **ENTER**:

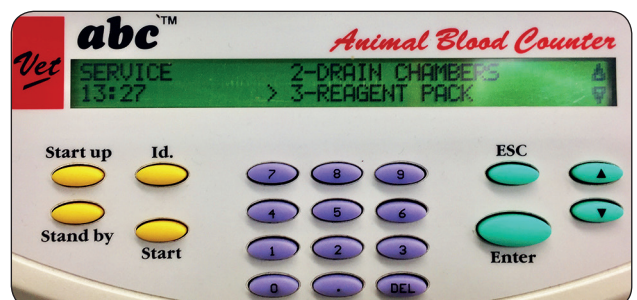

- Valitse **REAGENT PACK** -valikosta ylös-alas-nuolinäppäimillä **3-PRIME** ja paina **ENTER**:

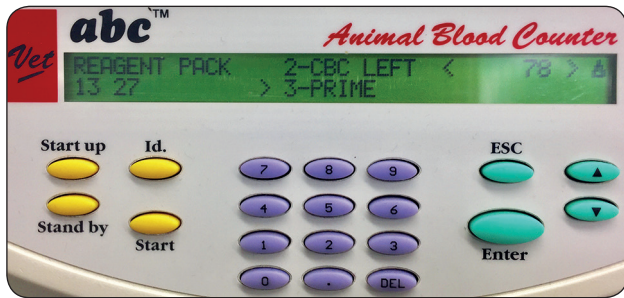

- Toista **PRIME**-toiminto kolme kertaa, jotta kaikki ilma letkuista on poistunut.
- Käynnistä laite käyttöohjeen mukaisesti, ja anna sen suorittaa **Start Up** -ajo.

KONTROLLIAJO JA LAITTEEN KÄYTTÖKUNNON TOTEAMINEN

- Aja laitteella käytössäsi oleva tuore kontrollinäyte ja vertaa tuloksia laitemallin viitearvoihin.

Lainalaite on käyttövalmis, jos:

- Start Up -ajo on mennyt hyväksytysti läpi.
- Kontrolliajon tulos on kontrollinäyte-erän viitearvojen sisällä.

Laitteen käyttöönottoon saa tukea puhelimitse numerosta **0201 226 602**.